

ANIOSPRAY QUICK

Dezinfectant pulverizabil

INDICAȚII:

ANIOSPRAY QUICK este un dezinfectant rapid dispozitive medicale curatate în prealabil și rezistente la alcool.

MOD DE UTILIZARE:

Produs gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare. ANIOSPRAY QUICK poate fi utilizat cu un pulverizator manual.

Pulverizați uniform pentru obținerea unui film antimicrobian uniform. Timp de contact minim 30 de secunde.



COMPOZIȚIE CALITATIVĂ:

Soluție hidroalcoolică (etanol 55%)

Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium (0,1%)

PROPRIETĂȚI TEHNOLOGICE:

Produs gata de utilizare; Soluție incoloră, fără miros; Densitatea 0,9 ; pH – ul produsului la +20° C ~ 5,5;

Stocare: între 5 - 25 °C

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:

ANIOSPRAY QUICK este un produs fabricat conform următoarelor norme de eficacitate antimicrobiană:

Bactericid:

SR EN 1040, SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 14561, inclusiv MRSA – 30 de secunde

Micobactericid

SR EN 14348 ; SR EN 14563 – *Micobacterium terrae* – 30 de secunde

SR EN 14348 ; SR EN 14563 – *Micobacterium avium* – 5 minute

Fungicid

SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - *Candida albicans* – 30 de secunde

SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - *Aspergillus niger* – 5 minute

Virucid : HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Vaccinia virus, Herpes virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus H1N1 – 30 de secunde

PRECAUȚII LA UTILIZARE:

Citiți fișa de securitate și eticheta. „Inflamabil” - respectați precauțiile de utilizare stabilite de Directiva Europeană 99/45/CE.

APARAT DE PULVERIZARE: Pulverizator manual.

Produs de uz extern. Inflamabil. Nu trebuie depozitat sau pulverizat în apropierea surselor de foc. A nu se fuma. În cazul contactului cu ochii clătiți imediat cu multă apă. În caz de ingerare consultați de urgență un medic, arătându-i eticheta. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

PREZENTARE: Cutie de 12 flacoane de 1L; Cutie de 4 bidoane de 5 L.

ANIOSPRAY QUICK

Proiect de eticheta

INDICAȚII: ANIOSPRAY QUICK este un dezinfectant rapid dispozitive medicale curatate în prealabil și rezistente la alcool.

MOD DE UTILIZARE: Produs gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare. ANIOSPRAY QUICK poate fi utilizat cu un pulverizator manual. Pulverizați uniform pentru obținerea unui film antimicrobian uniform. Timp de contact minim 30 de secunde.

COMPOZIȚIE CALITATIVĂ: Soluție hidroalcoolică (etanol 55%); Propionate de N,N-didécyl-N-méthylpoly(oxyéthyl)ammonium (0,1%)

PROPRIETĂȚI TEHNOLOGICE: Produs gata de utilizare; Soluție incoloră, fără miros; Densitatea 0,9 ; pH – ul produsului la +20° C ~ 5,5; Stocare: între 5 - 25 °C

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE: ANIOSPRAY QUICK este un produs fabricat conform următoarelor norme de eficacitate antimicrobiană:

Bactericid: SR EN 1040, SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 14561, inclusiv MRSA – 30 de secunde

Micobactericid SR EN 14348 ; SR EN 14563 – *Micobacterium terrae* – 30 de secunde; SR EN 14348 ; SR EN 14563 – *Micobacterium avium* – 5 minute

Fungicid : SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - *Candida albicans* – 30 de secunde; SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - *Aspergillus niger* – 5 minute

Virucid : HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Vaccinia virus, Herpes virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus H1N1 – 30 de secunde

CLASIFICAREA PREPARATULUI: Acest preparat a fost clasificat conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și modificărilor sale.



GHS07



GHS02

Pictograme de pericol:

Cuvânt de avertizare : PERICOL

Fraze de pericol : H226 Lichid și vapori inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție - Generale : P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Fraze de precauție - Prevenire : P210 A se feri de scântei și flăcări expuse. Fumatul interzis. P261 A se evita respirarea produsului pulverizat. P273 Evitați dispersarea în mediu. P280 A se purta mănuși de protecție.

Fraze de precauție - Intervenție : P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Fraze de precauție - Depozitare : P403 A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

Fraze de precauție - Eliminare : P501 Produsul neutilizat și ambalajul său trebuie îndepărtate ca deșeuri periculoase.

APARAT DE PULVERIZARE: Pulverizator manual. Produs de uz extern. Inflamabil. Nu trebuie depozitat sau pulverizat în apropierea surselor de foc. A nu se fuma. În cazul contactului cu ochii clătiți imediat cu multă apă. În caz de ingerare consultați de urgență un medic, arătându-i eticheta. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

PREZENTARE: Cutie de 12 flacoane de 1l; Cutie de 4 bidoane de 5 l.

CE 0459